


ROSALGIN


Irigátor pro intimní hygienu

Irigátor ROSALGIN je určen pro výplach pochvy roztokem ROSALGIN. Roztok se připraví rozpuštěním obsahu jednoho sáčku ROSALGIN v 0,5 l (max. 1 l) teplé, převařené vody. Pravidelná poševní hygiena přispívá k zachování přirozené bakteriální flóry v pochvě a může vhodně doplňovat lékařem doporučenou léčbu infekčních onemocnění ženských pohlavních orgánů. Irigátor lze používat opakovaně. Doporučuje se, aby irigátor používala pouze jedna žena. Pro přípravu roztoku na výplach je třeba používat převařenou vodu.


Správné použití irigátoru s roztokem ROSALGIN

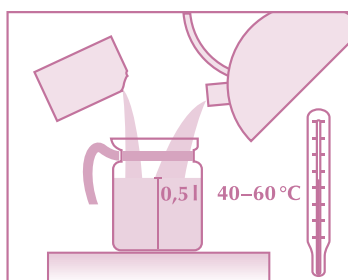


Obsah jednoho sáčku se rozpustí v 0,5 l (max. 1 l) teplé, převařené vody.

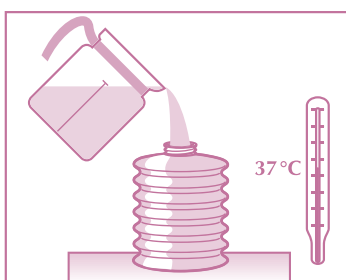


Nádobka irigátoru se naplní připraveným roztokem.

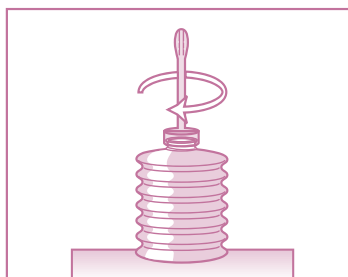


Vaginální nástavec se našroubuje na nádobku.

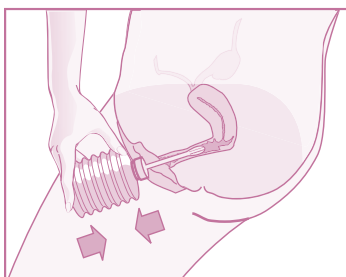

Nástavec se opatrně vsune do pochvy a zmáčknutím se nádobka vyprázdní.

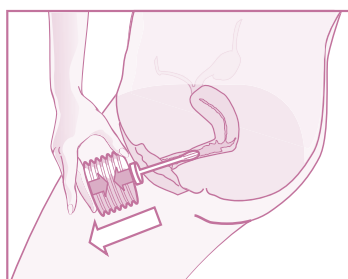

Nádobka se drží zmáčknutá a nástavec se opatrně vytáhne z pochvy.

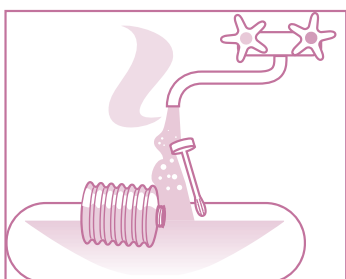

Po použití se irigátor pečlivě umyje teplou vodou a nechá oschnout.

Oblast zevního genitálu se omývá roztokem ROSALGIN, je-li třeba.
Obsah balení: 1 plastová nádobka s uzávěrem a 1 plastový nástavec.

Datum poslední revize textu: 10. 3. 2010

Výrobce: **Medicom International s.r.o.**
Páteční 7, 635 00 Brno, Česká republika
tel. 546 123 111, fax 546 123 112
IČO 18824706, www.medicomint.cz
ve spolupráci s ACTI PACK CZ, a.s.




L/133/06/C
L5008-A0310

ROSALGIN


Irigátor na intímnu hygienu

Irigátor ROSALGIN je určený pre výplach pošvy roztokom ROSALGIN. Roztok sa pripraví rozpustením obsahu jedného vrecka ROSALGIN v 0,5 l (max. 1 l) vlažnej, prevarenej vody. Pravidelná pošvová hygiena prispieva k zachovaniu prirodzenej bakteriálnej flóry v pošve a môže vhodne dopĺňať lekárom doporučenú liečbu infekčných ochorení ženských pohlavných orgánov. Irigátor možno používať opakovane. Odporúča sa, aby irigátor používala iba jedna žena. Na prípravu roztoku na výplach je potrebné používať prevarenú vodu.


Správne používanie irigátora s roztokom ROSALGIN

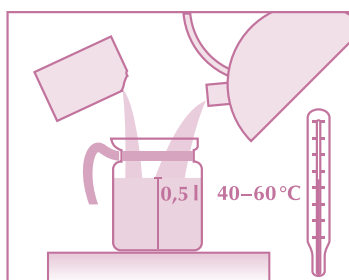


Obsah jedného vrecka sa rozpustí v 0,5 l (max. 1 l) vlažnej, prevarenej vody.

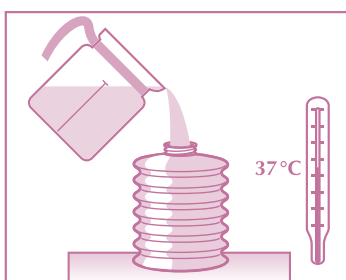


Nádobka irigátora sa naplní pripraveným roztokom.

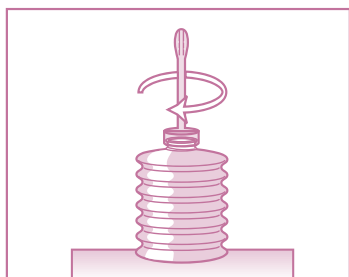


Vaginálny nástavec sa naskrutkuje na nádobku.

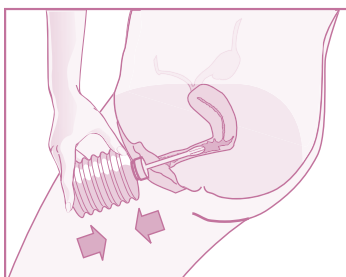

Nástavec sa opatrne vsunie do pošvy a stlačením sa nádobka vyprázdni.

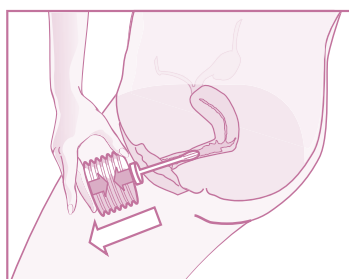

Nádobka sa drží stlačená a nástavec sa opatrne vytiahne z pošvy.

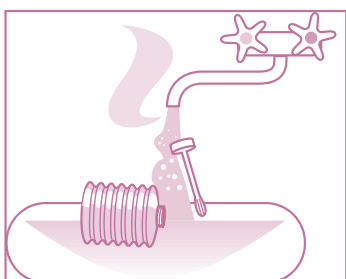

Po použití sa irigátor starostlivo umyje teplou vodou a nechá vyschnúť.

Ak je to potrebné, môže sa oblasť vonkajšieho genitálu opláchnuť roztokom ROSALGIN.

Obsah balenia: 1 plastová nádobka s uzáverom a 1 plastový nástavec.

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2010

Výrobca: **Medicom International s.r.o.**

Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Dovoz a distribúcia: **Med-art s.r.o.,**

Phoenix Zdravotnícké zariadenie, a.s.,

UNIPHARMA PRIEVIDZA 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Zastúpenie v SR: **CSC Pharmaceuticals Handels GmbH,**

Júnová 33, 831 01, Bratislava, Slovenská Republika



L/133/06/C
L5008-A0310